

# Deltec CADD Legacy PCA -pumpun ohjelmointikaavake mg/h tai µg/h



Potilaan nimi: \_\_\_\_\_ Syntymäaika: \_\_\_\_\_

Kytke virta päälle 'ON/OFF' -painikkeesta. Pumppu selaa automaattisesti läpi edellisen ohjelmoinnin. Odota, kunnes näyttöön tulee teksti 'Pysähtynyt'. Paina 'LUKKO' nähdäksesi onko pumppu lukittu (näytössä näkyy LL1 tai LL2). Avaa lukko painamalla jompaa kumpaa nuolinäppäintä, kunnes näytössä on 'LL0'. Paina uudelleen 'LUKKO', jolloin näyttöön tulee 'Koodi 0'. Aseta nyt nuolinäppäimillä koodi .... ja paina kolmannen kerran 'LUKKO'. Näyttöön tulee teksti 'Pysähtynyt', ja voit aloittaa ohjelmoinnin painamalla SEURAAVA-painiketta.

**Muista aina ohjelmoinnin jälkeen lukita pumppu uudelleen**, vaiheet ovat samat kuin lukituksen avaamisessa (LUKKO + LL2 + LUKKO + Koodi .... + LUKKO).

	Päivämäärä				
	Ohjelmoija(t)				
Näyttö	Lääkeaine				
Kasetin tilavuus ml	Lääke- tai nestemäärä yht.	_____ ml	_____ ml	_____ ml	_____ ml
Yksiköt mg tai µg	Valitse oikea yksikkö	milligrammat mikrogrammat	milligrammat mikrogrammat	milligrammat mikrogrammat	milligrammat mikrogrammat
Konsentraatio mg/ml tai µg/ml	Aseta lääkeaine-konsentraatio	_____ mg/ml _____ µg/ml	_____ mg/ml _____ µg/ml	_____ mg/ml _____ µg/ml	_____ mg/ml _____ µg/ml
Jatkuva infuusio mg/h tai µg/h	Valitse tarvittaessa	_____ mg/h _____ µg/h	_____ mg/h _____ µg/h	_____ mg/h _____ µg/h	_____ mg/h _____ µg/h
Kerta-annos mg tai µg	Aseta kerta-annos	_____ mg _____ µg	_____ mg _____ µg	_____ mg _____ µg	_____ mg _____ µg
Lukitus aika	Kerta-annosten aikarajoitus	_____ min	_____ min	_____ min	_____ min
Annosta/tunti	Kerta-annosten määrän rajoitus	_____ /h	_____ /h	_____ /h	_____ /h
Saadut annokset	Potilaan saamien kerta-annosten lukumäärä	_____ kpl	_____ kpl	_____ kpl	_____ kpl
Yritykset	Potilaan yrittämien kerta-annosten kokonaismäärä (saadut + yritetyt)	_____ kpl	_____ kpl	_____ kpl	_____ kpl
Annettu	Potilaan saama kokonaismäärä (kerta-annokset + jatkuva infuusio)	_____ mg/µg	_____ mg/µg	_____ mg/µg	_____ mg/µg
Ilmantunnistin käytössä High, Low/Ei käytössä	Käytä IV-infusiiossa aina ilmantunnistinta	} Muuta tarpeen mukaan, katso biomed-toiminnot.			
Virtaus sensori käytössä/Ei käytössä	Käytetään aina pussipiikin kanssa				
Lukitustaso					

## LETKUSTON ESITÄYTTÖ:

Varmista, että letkusto **EI** ole kytketty potilaaseen!  
 Paina ESITÄYTTÖ-painiketta, kunnes kolme (3) ---- ---- ---- tulee näytölle.  
 Vapauta painike ja paina uudelleen. Esitäyttö... Paina seuraava, kytke linja potilaaseen ja käynnistä STOP/START -painikkeesta.  
**MUISTA LUKITA OHJELMA JA ASENTAA LETKU ILMANTUNNISTIMEEN !!!**